



چرخه های فرآیند استریلیزاسیون بخار

کمترین زمان سیکل استریلیزاسیون اتوکلاو بخار گراویتی (ثقلی)

وسایل	زمان در دمای ۱۲۱ درجه سانتی گراد	زمان در دمای ۱۳۲ درجه سانتی گراد	زمان در دمای ۱۳۵ درجه سانتی گراد	زمان خشک کن
وسایل پوشش دار	۳۰ دقیقه	۱۵ دقیقه		۱۵-۳۰ دقیقه
			۱۰ دقیقه	۳۰ دقیقه
پک پارچه ای	۳۰ دقیقه	۲۵ دقیقه		۱۵ دقیقه
			۱۰ دقیقه	۳۰ دقیقه
ظروف پوشش دار	۳۰ دقیقه	۱۵ دقیقه		۱۵-۳۰ دقیقه
			۱۰ دقیقه	۳۰ دقیقه
وسایل متخلخل بدون پوشش		۳ دقیقه	۳ دقیقه	۰-۱ دقیقه
مخلوط وسایل متخلخل و غیر متخلخل بدون پوشش		۱۰ دقیقه	۱۰ دقیقه	۰-۱ دقیقه

کمترین زمان سیکل استریلیزاسیون اتوکلاو بخار پیش خلا (کلاس B)

وسایل	زمان در دمای ۱۳۲ درجه سانتی گراد	زمان در دمای ۱۳۵ درجه سانتی گراد	زمان خشک کن
وسایل پوشش دار	۴ دقیقه		۲۰-۳۰ دقیقه
		۳ دقیقه	۱۶ دقیقه
پک پارچه ای	۴ دقیقه		۵-۲۰ دقیقه
		۳ دقیقه	۳ دقیقه
ظروف پوشش دار	۴ دقیقه		۲۰ دقیقه
		۳ دقیقه	۱۶ دقیقه
وسایل متخلخل بدون پوشش	۳ دقیقه	۳ دقیقه	NA
مخلوط وسایل متخلخل و غیر متخلخل بدون پوشش	۴ دقیقه	۳ دقیقه	NA

✓ برای به کارگیری هر استریلایزر و اطلاع از زمان ها و دماهای چرخه ها، با سازنده دستگاه استریلایزر یا نماینده آن مشورت کنید.